


MASQUE EN TISSU À USAGE NON SANITAIRE

CATÉGORIE 1 - RÉUTILISABLE

LES 2 MODÈLES POSSÈDENT LES MÊMES PERFORMANCES DE FILTRATION

MODÈLE 1 : Trois couches séparées et assemblées en production (épais)

MODÈLE ADULTE

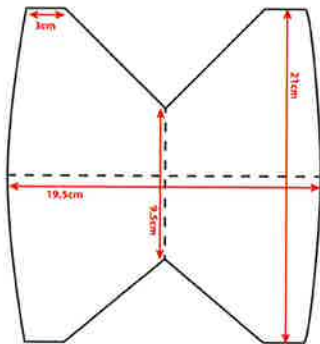

Modèle RÉSILIENCE 1 (Référence DGA : MED-1088 et LAV-1407)

Composition : 2 couches externes en polypropylène (100%)
et 1 couche interne en viscose (20%) et polyester (80%).


Taille adulte

Coloris : blanc ou gris

MODÈLE 2 : Matériel trois épaisseurs pressé lors de sa fabrication (plus fin)

MODÈLE ADULTE

MODÈLE ENFANT

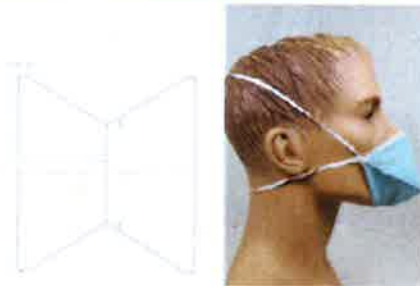

Modèle RÉSILIENCE 2 (Référence DGA : MED-1640)

Composition : 2 couches externes en spunbound (100% polypropylène)
et 1 couche interne en meltblow (100% polypropylène).

Taille adulte et enfant

Coloris : bleu ou vert

MASQUE EN TISSU À USAGE NON SANITAIRE

CATÉGORIE 1 - RÉUTILISABLE

Le masque RÉSILIENCE est de catégorie 1 (destiné aux personnels affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public) et réutilisable. Il répond à la norme SPEC S76-001 de l'AFNOR. Les performances en perméabilité à l'air et en efficacité de filtration sont conservées jusqu'à 20 lavages. Ces caractéristiques ont été testées par la Direction Générale de l'Armement (DGA). Il ne répond pas à la norme EN 14683 et ne doit en conséquence pas être utilisés par les soignants au cours de leurs activités professionnelles au contact des patients. Ce type de masque est destiné à éviter lors de l'expiration de celui qui le porte, la projection de sécrétions des voies aériennes supérieures ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles par voie de gouttelettes ou par voie aérienne.

Pour les consignes de port et d'entretien, merci de se référer à la notice d'utilisation.

Description du produit :

Forme : bec de canard

2 élastiques

2 tailles : Adulte, Enfant

Tests établis par la Direction Générale de l'Armement (DGA) après 20 lavages*

Caractéristiques	Seuils de la Catégorie 1	Modèle RÉSILIENCE 1 (LAV-1407 version lavée du MED-1088) Modèle RÉSILIENCE 2 (MED-1640)
Perméabilité à l'air à dépression 100Pa	>96 L.m ² .s ⁻¹	>190 L.m ² .s ⁻¹
Efficacité de filtration des particules de 3µm émises	>90%	99%

*Les rapports de tests de la DGA sont disponibles sur demande.

NOTICE D'UTILISATION

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes



COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Avant de le mettre :

01. Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
02. Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
03. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
04. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.

Pour le mettre :

01. Tenez le masque par les lanières élastiques.
02. Placez-le au niveau de votre bouche.
03. Passez les lanières élastiques derrière la tête.
04. Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.

Lorsque vous le portez :

01. Évitez de le toucher et de le déplacer.
02. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

Il faut changer le masque :

01. Quand vous avez porté le masque 4h.
02. Quand vous souhaitez boire ou manger.
03. Quand il devient difficile de respirer.
04. Si le masque s'humidifie.
05. Si le masque est endommagé.
06. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Pour l'enlever :

01. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
02. Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage.
03. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.
04. Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
05. Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

